


● スクリュー装着の際は、Step1~3の手順を推奨しております。

Step 1

ドライバー先端部をスクリューヘッドの上に**軽く**乗せます。

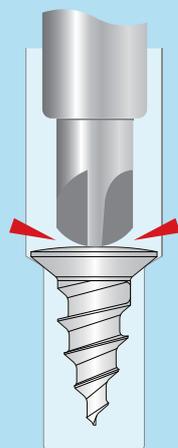


※インプラントケースを軽く押さえてください。

Step 2

ドライバービットを**押し込まず**に**少し回転させ**、スクリューヘッドに噛み合わせます。

● 「カチッ」と噛み合う感触が伝わります。

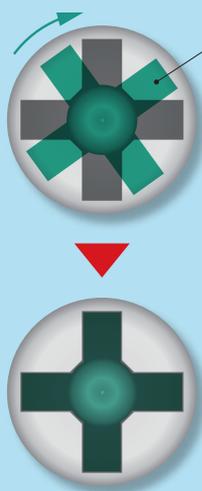


ドライバービット先端



Step 3

重要
ドライバーを**垂直に強く押し込み**、**確実に把持**させます。

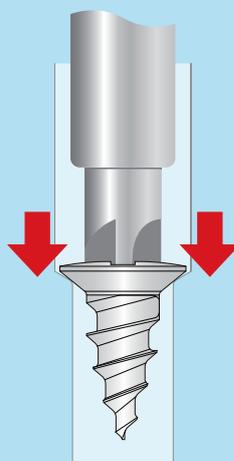

➡ 裏面もご覧ください。

スクリュー装着における**コツ**などをまとめています。


インプラントケースの**設置場所**

滅菌パックから取り出したインプラントケースは、器械ケース内に設置することで装着作業が安定します。

器械ケースに乗せない場合は、固い器械台の上などで行ってください。



滅菌パック

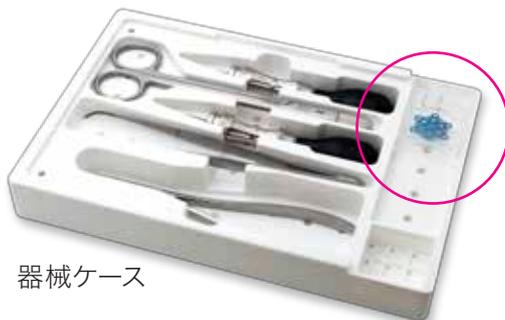


器械ケース



落下を防ぐ**スクリューホール**

インプラントケースのスクリューホールは、スクリューのこぼれ落ちを防ぐために、ケース上面よりも少し沈めて格納するように設計してあります。

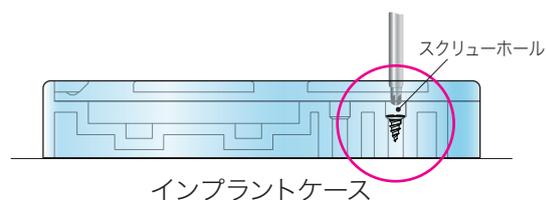

インプラントケース

SPモータードライバーの**持ち方**

SPモータードライバーをご使用の場合は、ドライバー本体の後端を軽くつまむように持つことで、インプラントケースのスクリューホールに対して垂直にアプローチし易くなります。



強固な**把持力**

装着手順 Step1~3 を行う事により、指先で引っ張っても簡単に外れない、強固な把持力となります。

装着手順Step1~3を行ってもスクリュー把持力が弱い場合、ドライバービットの消耗が考えられます。担当営業にお知らせください。

