

SP *Neurosurgery Power Equipments* **Motor Driver**

SPモータードライバーⅢ



versatilely

made in Japan

S&Brain

"SPモータードライバー"

1台でマイクロプレートへのスクリュー挿入、骨の穿孔が可能です。

attachment

ドライバービット、ツイストドリルなどを装着します。

switch

FW : 正転
BACK : 逆転

battery box

ドライバー本体の後方から装着します。



SP Neurosurgery Power Equipments Motor Driver



電池BOX

CR2 (市販品リチウム電池) を使用



流水洗浄用キャップ

本体を洗浄する際、後端に装着します。



スクリュービット

スクリューの装着・挿入を行います。



アジャスター付ツイストドリル (穿孔用)

骨を穿孔するツイストドリル。
ストッパー位置を調節して骨の厚みに合わせる
ことができます。

ツイストドリル (スクリュー挿入下穴用)

スクリュー挿入前に、下穴が必要な場合に使用します。
4mmストッパー付



ワイヤーパスドリル

テンテイングなどに使用します。



SPモータードライバーⅢの取扱いについて

本品使用後は、できるだけ早く以下の手順に従って洗浄・滅菌を行って下さい。

1. 洗浄

- ・流水で洗浄を行い、必要に応じて医療用中性洗剤又はアルコールを湿らせた清潔な柔らかい布で、機器に付着した血液及び組織片等を除去する。
- ・再度、蒸留水又は滅菌水を湿らせた清潔な柔らかい布でふくこと。
- ・清潔な乾いた布で、機器を拭いて乾かすこと。
- ・本品は防水機能を有してはいるが、超音波洗浄装置等の洗浄装置に浸漬して使用しないこと。
- ・強アルカリ、強酸性の洗剤や消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- ・洗浄後は腐食防止の為、速やかに乾燥すること。

2. 推奨滅菌方法

- ・本品はプラズマ滅菌及びEOG滅菌が可能です。※高圧蒸気滅菌は行わないで下さい。

製品一覧

品番	製品名	JANコード	医療機器届出番号
SPM101	SPモータードライバーⅢ	4589467350119	15B1X10002000008
SPM101B	SPモータードライバーⅢ（CR2：3個、特注）	4589467350287	
SPM102	SPモータードライバー電池BOX	4589467350126	
SPM103	SPモータードライバー洗浄用キャップ	4589467350133	
SPM104	SPモータードライバーケース（標準）	4589467350140	
SPM105	SPモータードライバーケース（アジャスター付きツイストドリル用、特注）	4589467350157	
SPM106	SPモータードライバー電池BOX（CR2：3個、特注）	4589467350263	
SPM107	SPモータードライバーケース（SPM101B対応、特注）	4589467350270	15B1X10002000009
SPM110	SPスクリュービット	4589467350164	
SPM111	SPツイストドリル（Φ1.1mm、4mmストップ）	4589467350171	15B1X10002000010
SPM112	SPツイストドリル（Φ1.5mm、4mmストップ）	4589467350188	
SPM113	SPアジャスター付きツイストドリル（Φ2mm、ストップ幅：0-20mm）	4589467350195	
SPM114	SPアジャスター付きツイストドリル（Φ3mm、ストップ幅：0-20mm）	4589467350201	
SPM115	SPアジャスター付きツイストドリル（Φ3.5mm、ストップ幅：0-20mm）	4589467350218	
SPM116	SPアジャスター付きツイストドリル（Φ4mm、ストップ幅：0-20mm）	4589467350225	
SPM117	SPアジャスター付きツイストドリル（Φ2.7mm、ストップ幅：10-30mm）	4589467350232	
SPM118	SPアジャスター付きツイストドリル（Φ3.2mm、ストップ幅：20-40mm）	4589467350249	
SPM119	SPワイヤーバードリル	4589467350256	

取扱代理店

製造元

プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

製造販売元

エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0021 千葉県浦安市富岡3-3 F415
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518