



*Neurosurgery
Power Equipments*

Round Cutter

バーホール拡張用 SKラウンドカッター



easy expansion

made in Japan

S&Brain

汎用性のある"拡張専用ラウンドカッター"
穿孔後、バーホールをお好みの形状に簡単に形成できます。


意匠登録
取得済

ハドソン式バーエンド

洗浄注水用穴

カッター

硬膜ガード

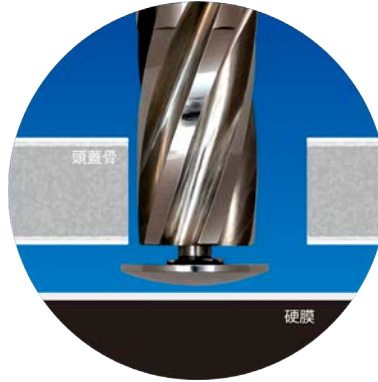

「硬膜ガード」の安全機構

- 頭蓋骨と硬膜の間に硬膜ガードを入れて削るため、カッターが硬膜に触れることはありません。
- 硬膜ガードはカッター部と分離構造になっているため、回転することはなく、硬膜損傷のリスクを低減します。

特長

- **安全性:** 硬膜ガードが硬膜を保護します。
- **汎用性:** 各社のハドソン式ドリルに適合します。
- **迅速性:** 6枚刃でシャープな切れ味を実現します。
- **経済性:** リユースでランニングコストを軽減します。

SKラウンドカッターの取扱いについて

本品のご使用については、下記の内容に従ってください。

1. 洗浄

本品はステンレス製ですので、各施設の銅製小物と同じ洗浄方法を行なってください。
骨クズ・血液等の除去のために使用後は、速やかに右図の洗浄を推奨します。



流水をかけながら、ブラシで骨クズを取り除いてください。

2. 滅菌

高圧蒸気滅菌が可能です。
(135°C 8~10分、または121°C 20分)

品番	製品名	規格				JANコード
		全長	刃径	刃溝部	硬膜ガード径	
SPD101	SKラウンドカッター	52mm	8.5mm	19mm	10.5mm	4573198958485

販売名: SKラウンドカッター
医療機器届出番号: 15B1X10002000012
一般的名称: 頭蓋骨用バー
クラス分類: 一般医療機器
JMDN: 10520001

S&Brain

取扱代理店

製造販売元
プロスパー株式会社
〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元
エス・アンド・ブレイン株式会社
〒279-0021 千葉県浦安市富岡3-3 F415
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518