

UPDATE

SK

*Neurosurgery
Power Equipments*

Round Cutter

バーホール拡張用 SKラウンドカッター




easy expansion

made in Japan

S&Brain

汎用性のある"拡張専用ラウンドカッター"
穿孔後、バーホールをお好みの形状に簡単に形成できます。

意匠登録
取得済

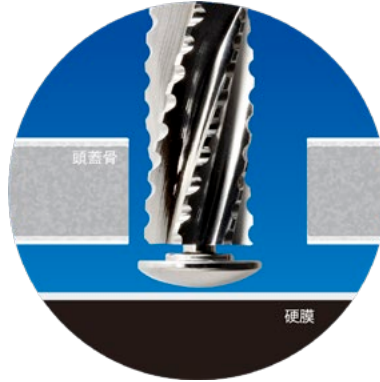

「硬膜ガード」の安全機構

- 頭蓋骨と硬膜の間に硬膜ガードを入れて削るため、カッターが硬膜に触れることはありません。
- 硬膜ガードはカッター部と分離構造になっているため、回転することなく、硬膜損傷のリスクを低減します。

特長


- **安全性:** 硬膜ガードが硬膜を保護します。
- **汎用性:** 各社のハドソン式ドリルに適合します。
- **操作性:** ラフィング加工で骨からの跳ね返りを軽減
- **迅速性:** 6枚刃でシャープな切れ味を実現します。
- **経済性:** リユースでランニングコストを軽減します。

SKラウンドカッターの取扱いについて

本品のご使用については、下記の内容に従ってください。

1. 洗浄

本品はステンレス製ですので、各施設の鋼製小物と同じ洗浄方法を行なってください。
骨クズ・血液等の除去のために使用後は、速やかに右図の洗浄を推奨します。

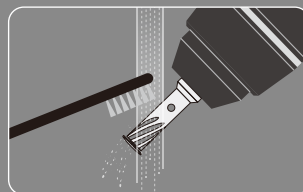

流水をかけながら、ブラシで骨クズを取り除いてください。

2. 滅菌

高圧蒸気滅菌が可能です。
(135°C 8~10分、または121°C 20分)

品番	製品名	規格(mm)				JANコード
		全長	刃径	有効刃長	硬膜ガード径	
SPD101	SKラウンドカッター	52.5	8	17	9	4573198958485

販売名: SKラウンドカッター
届出番号: 15B1X10002000012
一般的名称: 頭蓋骨用パー
クラス分類: 一般医療機器
JMDN: 10520001

取扱代理店

製造販売元

プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元

エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518