



Neurosurgery  
Power Equipments

# Round Cutter

バーホール拡張用

SKラウンドカッター  
レスキューラウンドカッター



Two type of  
Round Cutter

made in Japan

**S&Brain**



## 用途に応じた2種類の"拡張専用ラウンドカッター"

### SKラウンドカッター

穿孔後のパーホールをお好みの形状に形成。


### レスキューラウンドカッター

不完全な穿孔時の救援ツール。



#### 「硬膜ガード」の安全機構

- 頭蓋骨と硬膜の間に硬膜ガードを入れて削るため、カッターが硬膜に触れることはありません。
- 硬膜ガードはカッター部と分離構造になっているため、回転することなく、硬膜損傷のリスクを低減します。

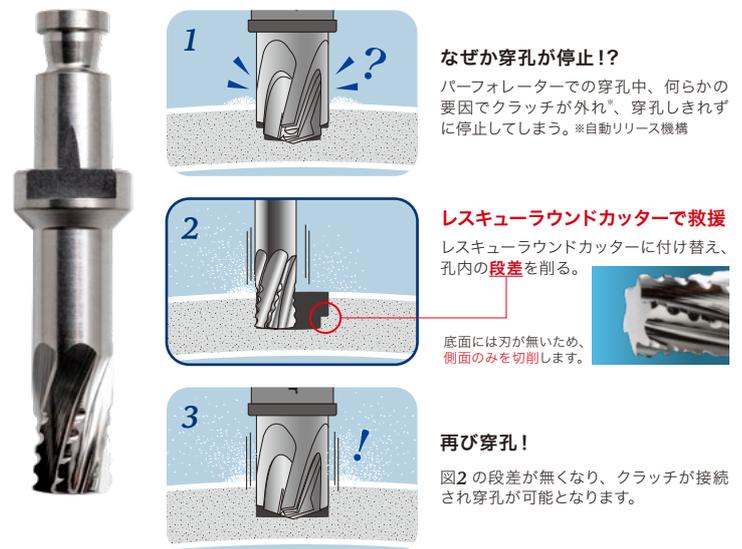

#### なぜか穿孔が停止!?

パーフォレーターでの穿孔中、何らかの要因でクラッチが外れ、穿孔しきれずに停止してしまう。\*自動リリース機構

#### レスキューラウンドカッターで救援

レスキューラウンドカッターに付け替え、孔内の段差を削る。

底面には刃が無いため、側面のみを切削します。

#### 再び穿孔!

図2の段差が無くなり、クラッチが接続され穿孔が可能となります。

### 特長

- **安全性** SKラウンドカッター/硬膜ガードが硬膜を保護します。  
レスキューラウンドカッター/先端の底面には刃が無いため、穿孔することはありません。
- **迅速性** 6枚刃でシャープな切れ味を実現。
- **汎用性** 各社のハドソン式ドリルに適合します。
- **操作性** ラフィング加工のカッターで骨からの跳ね返りを軽減。
- **経済性** リユースでランニングコストを軽減します。

## SKラウンドカッターの取扱いについて

本品のご使用については、下記の内容に従ってください。

### 1. 洗浄

本品はステンレス製ですので、各施設の鋼製小物と同じ洗浄方法を行なってください。  
骨クズ・血液等の除去のために使用後は、速やかに右図の洗浄を推奨します。



流水をかけながら、ブラシで骨クズを取り除いてください。

### 2. 滅菌

高圧蒸気滅菌が可能です。

(134°C 8~18分、または121°C 20分)

本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。

| 品番     | 製品名           | 規格 (mm) |    |      |        | JANコード        |
|--------|---------------|---------|----|------|--------|---------------|
|        |               | 全長      | 刃径 | 有効刃長 | 硬膜ガード径 |               |
| SPD101 | SKラウンドカッター    | 52.5    | 8  | 17   | 9      | 4573198958485 |
| SPD103 | レスキューラウンドカッター | 49.3    | 8  | 8    | —      | 4580758643378 |

販売名: SKラウンドカッター  
届出番号: 15B1X10002000012  
一般的名称: 頭蓋骨用パー  
クラス分類: 一般医療機器  
JMDN: 10520001

### 取扱代理店

#### 製造販売元

#### プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6  
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

#### 販売元

#### エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201  
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518