

SP

Neurosurgery
Power Equipments

Motor Driver

SPモータードライバーⅣ

1台でマイクロプレートへのスクリュー挿入、骨の穿孔が可能





ドライバービット

スクリューの装着・挿入時に使用



ワイヤーバードリル

テンテイングなどに使用



下穴ドリル

スクリュー挿入前に、下穴が必要な場合に使用



SPアジャスター付きツイストドリル

骨を穿孔するドリル
骨の厚みに合わせてストッパー位置を調節



SPモータードライバーⅣの取扱いについて

本品使用後は、できるだけ早く以下の手順に従って洗浄・滅菌を行って下さい。

1. 洗浄

- ・流水で洗浄を行い、必要に応じて医療用中性洗剤又はアルコールを湿らせた清潔な柔らかい布で、機器に付着した血液及び組織片等を除去する。
- ・再度、蒸留水又は滅菌水を湿らせた清潔な柔らかい布でふくこと。
- ・清潔な乾いた布で、機器を拭いて乾かすこと。
- ・本品は防水機能を有してはいるが、超音波洗浄装置等の洗浄装置に浸漬して使用しないこと。
- ・強アルカリ、強酸性の洗剤や消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- ・洗浄後は腐食防止の為、速やかに乾燥すること。

2. 推奨滅菌方法

- ・本品はプラズマ滅菌及びEOG滅菌が可能です。※高圧蒸気滅菌は行わないで下さい。

製品一覧

品番	製品名	JANコード	医療機器届出番号
SPM400	SPモータードライバー (Ⅳ) セット	4580758643156	15B1X10002000008
SPM401	SPモータードライバー (Ⅳ) 本体	4580758643163	
SPM402	SPモータードライバー (Ⅳ) 電池BOX	4580758643170	
SPM403	SPモータードライバー (Ⅳ) ケース	4580758643187	
SPM011	ドライバービット (M)	4573198958386	15B1X10002000009
SPM012	モータードライバー用ワイヤーバードリル (φ1.5mm)	4573198958393	15B1X10002000010
SPM021	モータードライバー用ワイヤーバードリル L (φ1.5mm)	4580758643361	
SPM013	下穴ドリル (φ1.2mm、4mmストップ)	4573198958409	
SPM014	下穴ドリル (φ1.5mm、4mmストップ)	4573198958416	
SPM015	SPアジャスター付きツイストドリル (φ2.2mm、ストップ幅：0-15mm)	4573198958423	

取扱代理店

製造販売元

プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元

エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518